

Koboカップ



安心安全なTLHをサポート致します！

Koboカップ

(内視鏡用拡張器)

特徴:

全腹腔鏡下子宮全摘術(TLH)等の腹腔鏡下における子宮摘出術で使用する製品です。
膣管切離時に膣を拡張する事で膣円蓋の切離ラインを明確にします。

使用方法:

一例として

- 1: TLHの膣壁の切開の際、Koboカップを膣より挿入し、開口部を膣腔側より前膣円蓋部に押し付け拡張させる。
- 2: 前膣円蓋部を同定し膣側の切離線を決定する。
- 3: Koboカップの開口部で膣壁を伸展させながら、電気メス等で切離する。
- 4: 膣壁を全周切離後にKoboカップを膣から抜き、膣式に子宮を摘出する。

販売名: Koboカップ 届出番号: 11B2X10025000016
一般的名称: 自然開口向け単回使用内視鏡用拡張器

| 商品名 | 品番 | 販売単位 | サイズ |
|---------|------|--------|---------------------------|
| Koboカップ | TH-1 | 1箱/10入 | 38mm(カップ外形) 7.8mm(底部穴) |

製造販売元: 株式会社アステック
〒355-0063 埼玉県東松山市元宿2丁目36番地20
Tel: 0493-34-4311 Fax: 0493-34-4350