




リアルな拍動で吻合練習

OPCABトレーナー 鼓動

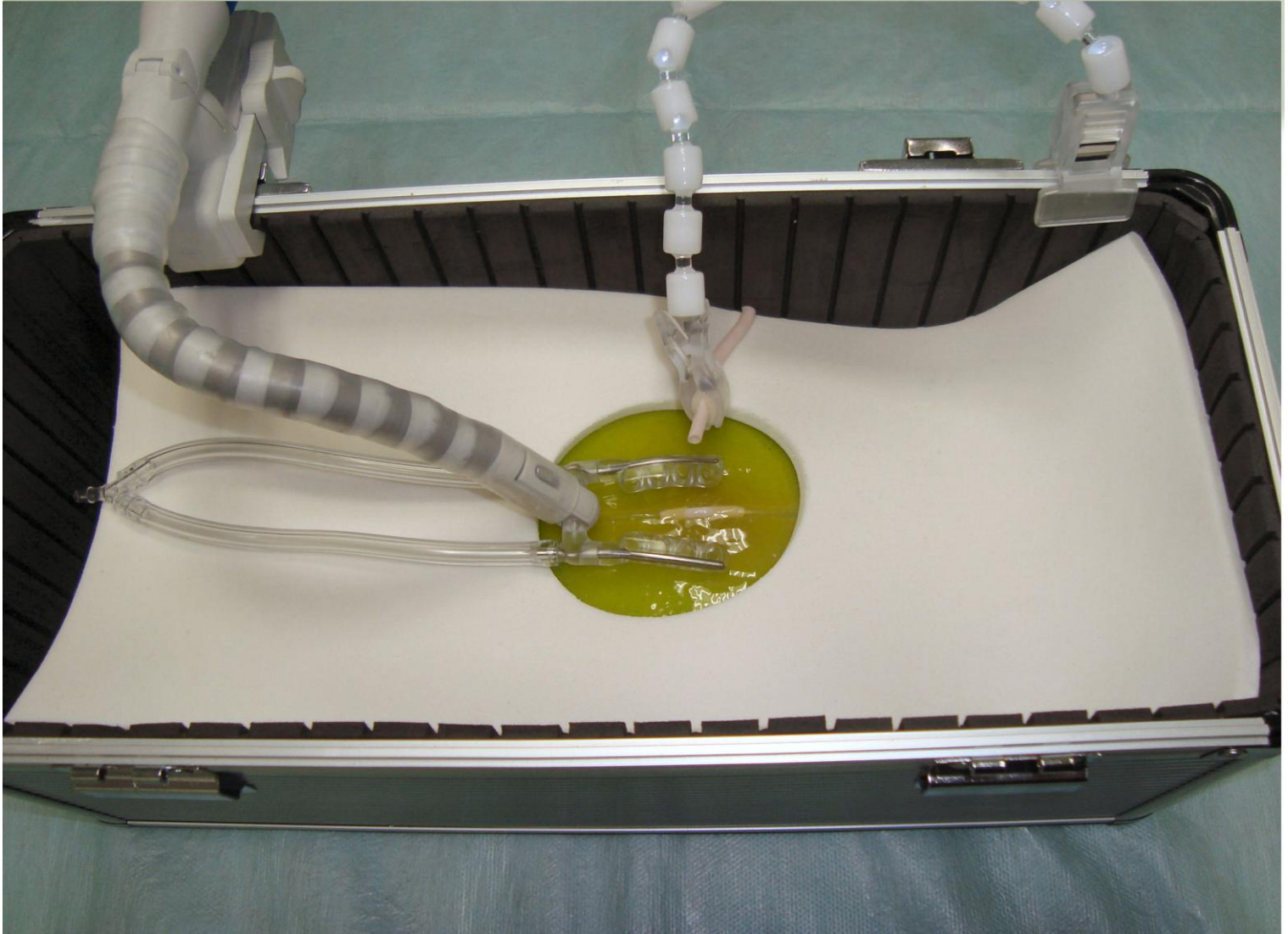

拍動下の冠動脈吻合をリアルに再現

吻合ホールを傾げる事で側面の吻合練習も出来ます。

ハートレートや振幅を可変して難易度を調整する事が出来ます。

模擬心筋は血管部分だけ交換出来るので経済的です。

電源は単三乾電池と商用100V、いつでも、どこでも練習出来ます。

※ 写真のスタビライザーは別売となります。

商品名 OPCAB トレーナー

鼓動

品番 KD-01



特徴

- ◆ 実際に手術で御使用頂いているスタビライザーを併用頂く事でより実際の手技に近い練習が行えます。(スタビライザーはご希望の物を別途販売可能です。)
- ◆ 吻合ホール(写真の白いシート)を左右に移動する事で、振幅の強弱が変化し、縦方向に固定する事で脱転状態での吻合練習も可能です。
- ◆ 心筋には血管を通す為の内空が有り、中央のスリットに短く切った模擬血管を鑷子等で挿入して使用します。これにより、血管だけ取り出して繰り返し御使用出来ます。
※血管は強度・厚さの異なる3タイプが付属します。(御希望によりタイプ選択可)
- ◆ ハートレートは付属のACアダプタで6段回に切替出来ます。
(乾電池使用の場合はレート60前後の固定となります。)



付属品

- ◆ 拍動モジュール 1台
- ◆ 模擬心筋 5枚
- ◆ 模擬血管 (1.5・2.2・2.7mm)x7cm 各18本
- ◆ 模擬血管 1.2mmx5cm 18本
- ◆ ACアダプタ 1台
- ◆ 乾電池ケース 1個
- ◆ 単三電池 4個
- ◆ 吻合ホール(白シート) 1枚
- ◆ グラフトホルダー 1本
- ◆ 収納ケース 1箱

製造販売元

 STEC 株式会社アステック

〒355-0063 <http://www.astec7.com>
埼玉県東松山市元宿2-36-20
TEL 0493-34-4311

※本商品は受注生産品となります。
予告なく仕様変更を行う場合がございます。
改定年月日:2014.04.01